

Préleveur :

Diplôme de Médecin ou de Pharmacien Biologiste

Diplôme d'Etat d'Infirmier

<u>Type de prélèvement</u>	<u>Matériel</u>	<u>Etapas</u>
Prélèvements d'ongles	Lame de scalpel Boîte de pétri Ecouvillon sec épais	<u>Ongles</u> : à l'aide d'un scalpel ou d'une curette gratter à la limite de la zone saine Laisser tomber les prélèvements directement dans une boîte de pétri. En cas de lésion suintante, frotter un écouvillon sur le pus et gratter le plancher de la lésion.
Prélèvement de peau / squames	Lame de scalpel ou lame de verre Pince à épiler Boîte de pétri	<u>Squames</u> : à l'aide d'un scalpel, d'une curette ou d'un bord de lame en verre, gratter de préférence à la périphérie des lésions et des squames (à la limite de la partie saine). Si possible, prélever une lésion jeune où les champignons sont en division active. S'il y a des poils follets en périphérie, les arracher.
Prélèvements des teignes du cuir chevelu	Lame de scalpel Pince à épiler Boîte de pétri	Prélever à la fois les squames et les cheveux atteints. • <u>squames</u> : si elles sont abondantes, éliminer les plus superficielles qui sont souvent souillées par les champignons saprophytes et les bactéries. Gratter les squames fines qui sont à la limite de la peau saine et les laisser tomber directement dans la boîte de pétri. • <u>cheveux</u> : chercher, en périphérie de la plaque d'alopecie, les cheveux récemment atteints. Repérer les cheveux cassés, les arracher avec une pince à épiler. Vérifier que le bulbe des cheveux a bien été arraché. En cas de lésion suintante, frotter un écouvillon sur le pus et gratter au niveau des orifices pilaires.
Pityriasis versicolor	Lame en verre Scotch transparent	Appliquer un morceau de scotch transparent sur la lésion Le transférer directement sur une lame

- Identifier les prélèvements avec le nom, prénom et date de naissance du patient.